

## BUIKLIGGING - 15 GRADEN CRAWL BUIKLIGGING MET HEUPONTLASTING




- Dichtgevallen longblaasjes
- Ernstig opgehoopt slijm
- Tube-beademing geeft het lichaam niet voldoende zuurstof (O<sub>2</sub>)

Eventueel het bed in een Anti-trendelenburg positie op 30 graden. Dit vermindert oedeemvorming van het gelaat en voorkomt reflux van maaginhoud



vouwlijn

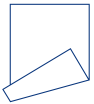

**1**

No force (aan de cliënt niet hardhandig duwen en trekken).

**2**

Neem altijd een handbreedte ruimte.

**3**

Alle ruimtes vullen waar het lichaam van de cliënt geen contact met het kussen heeft.

**4**

Tussen de cliënt en kussen strijken om overdruk van lucht weg te nemen.

**5**

De cliënt in een zijligging tegengesteld steunen