

## TURNABILITY

Het onderste deel (glijtunnel) wordt niet nat en de patiënt kan hierdoor moeiteloos worden verplaatst.




Bovenkant van Turnability


Voorzien van sterk absorberend materiaal dat vocht supergoed en snel absorbeert.



Onderkant van Turnability

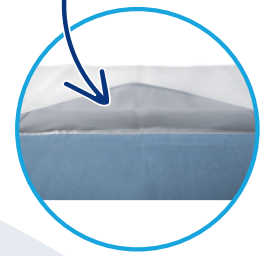

De buitenste handvatten kun je aantrekken, hiermee verplaats je patiënt van rechts naar links (en andersom)

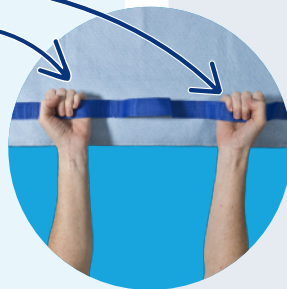

Het middelste handvat is voor het evt. corrigeren van trekspanning op de huid en het recht plaatsen van de heup (kop recht in de kom)

### TURNABILITY VAN REBACARE<sup>®</sup>:

Turnability is ontworpen om de zorgprofessional fysiek te ontlasten en de patiënt handig van rechts naar links (en andersom) te verplaatsen. Voor de patiënt zelf (met verminderde spierkracht) is Turnability erg handig om langer en zelfstandig te kunnen draaien in bed. Turnability biedt zekerheid doordat het is voorzien van sterk absorberend materiaal dat vocht snel absorbeert. Hierdoor is Turnability functioneel te gebruiken als **incontinentie onderlegger**. Turnability lekt niet door en beschermt het matras. Turnability is zeer geschikt voor de zorgprofessional bij het uitvoeren van PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven) en ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen). Turnability is voor uw organisatie kostenbesparend, duurzaam en herbruikbaar. Dit in tegenstelling tot dure wegwerp incontinentie onderleggers. **Let op dat patiënt met de passieve lift op het bed wordt gebracht. Gebruik niet de handvatten van Turnability om aan de passieve- of transfer lift te hangen.**

### HANDIG IN GEBRUIK OMDAT:

- Aanzienlijk verminderde fysieke belasting van de zorgprofessional.

- De patiënt handig van rechts naar links (en andersom) te verplaatsen is.
- Turnability kan onder de cliënt blijven liggen.
- Een makkelijk toepasbaar handvat die de trekspanning van de huid kan corrigeren na het verplaatsen van de patiënt.
- De bovenste laag absorbeert supergoed als het nat wordt.
- De glijtunnel (aan de onderkant bevestigd) blijft helemaal droog, glad en goed glijbaar.
- Turnability is veilig door een ingebouwde stoprand. Deze stoprand helpt voorkomen dat de patiënt te ver wordt verplaatst.
- Turnability is hygiënisch in gebruik omdat het wel 100 x wasbaar is op 95 graden en het kan worden gedroogd in de droger.

### INZETBAAR VOOR:

- Particulieren
- Intramurale zorg

Omschrijving: Turnability

Maat: één uitvoering voor alle maten

Artikelnummer: 7775

