

## RUGLIGGING - FLEXIE ABDUCTIE



### INDICATIE

- Decubitus stuit, schouder en wervelkolom
- Buigspasmen
- Flexie-contracturen van de benen


Indien geen gevaar van decubitus bij wervelkolom en stuit, kan Comfort XL worden verwijderd



Gebruik de bedbediening (bij been oedeem en/of spasmen) om een Fowler (knie-knik) te maken



vouwlijn

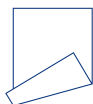

### VIJF REBA REGELS

- 1 No force (aan de cliënt niet hardhandig duwen en trekken).
- 2 Neem altijd een handbreedte ruimte.
- 3 Alle ruimtes vullen waar het lichaam van de cliënt geen contact met het kussen heeft.
- 4 Tussen de cliënt en kussen strijken om overdruk van lucht weg te nemen.
- 5 De cliënt in een zijligging tegengesteld steunen