


LEUNONDERSTEUNING - ELLEBOOGONTLASTING




- Decubitus ellebogen
- Benauwdheid
- Voorover leunen


*Luna wordt gebruikt als
weinig ruimte is en is
geschikt voor minder
brede personen*

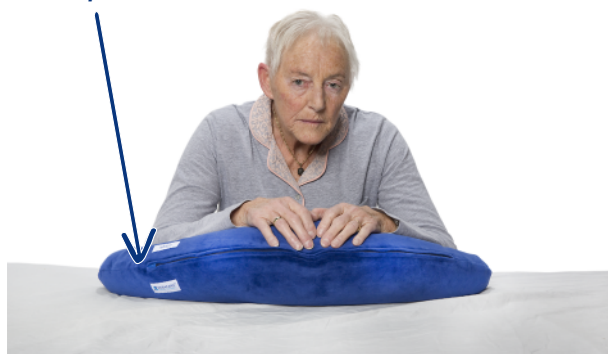

*Role wordt gebruikt voor
breder en zwaardere
personen*

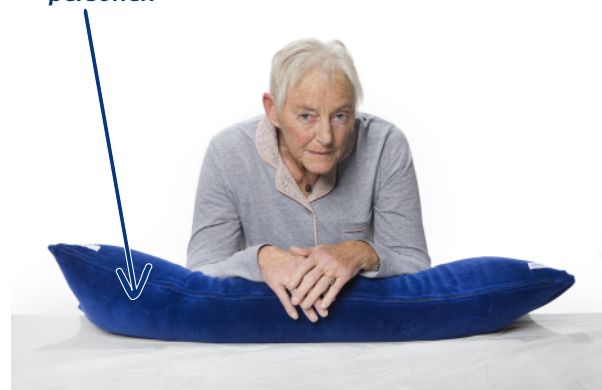

vouwlijn

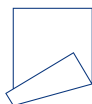

1

No force (aan de cliënt niet hardhandig duwen en trekken).

2

Neem altijd een handbreedte ruimte.

3

Alle ruimtes vullen waar het lichaam van de cliënt geen contact met het kussen heeft.

4

Tussen de cliënt en kussen strijken om overdruk van lucht weg te nemen.

5

De cliënt in een zijligging tegengesteld steunen