

DYNAMISCHE POSITIONERING ORTHESE (DPO)

De DPO van REBACARE® biedt drukverlaging en pijnreductie. De DPO is voor preventief en curatief gebruik en biedt comfort voor patiënten met een verhoogd risico op decubitus, spierspanning en contracturen waardoor houdingsmanagement nodig is.

Door juist te positioneren en met de hand te strijken tussen patiënt en het component kan het overtollige lucht door de filters eruit worden gestreken. Daarna sluit het filter zich automatisch. Hierdoor wordt een individuele mal gecreëerd van het lichaam.

De patiënt wordt comfortabel en volledig ondersteund zonder overdruk. Door deze handelwijze wordt pijn, decubitus, contracturen, spierspanning- en verslapping tegen gegaan.

DE DPO VAN REBACARE®

- De naden zijn volledig gelast en daardoor vocht- en bacteriëndicht
- Helpt kruisinfectie voorkomen
- Het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend
- Helpt op juiste wijze positioneren en corrigeren zonder losse steunen
- Het lichaam wordt ontzien van druk
- Voldoet aan de EPUAP-Norm
- Voorzien van CE-Keurmerk
- Kan gereinigd worden met 1000 ppm Chlorine, 70% alcohol, OxyFoam, OxyWipe of detergent.
- Past binnen de WIP richtlijnen
- Er zijn 2 soorten hoezen leverbaar

DE DPO VAN REBACARE® IS INZETBAAR VOOR:

- IC en ziekenhuisafdelingen
- Verpleeg- en verzorgingshuizen
- Revalidatiecentra
- Particulier / thuis

Het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend



De naden zijn volledig gelast en zijn vochtafstotend en bacteriëndicht

BIJPASSENDE HOEZEN ZIJN LEVERBAAR IN 2 VARIANTEN:

- 1** **Standaard Nicky hoezen** (80% katoen en 20% polyester en op 60 graden te wassen en kan in de droger) artikelnummer + H
- 2** **Stretch hoezen** (100% katoen, krimpvrij en op 60 graden te wassen en kan in de droger) artikelnummer + HKS

DIVERSE SOORTEN VULLINGEN 1 2 3

1

GESILICONISEERDE HOLLE VEZEL EN EPS (PARELS)

Een zeer goede kwaliteit met behoud van volume en vorm. Het heeft een hoog veerkrachtig vermogen. Een combinatie van twee soorten (2 3) vullingen. Het biedt ondersteuning en kan goed druk reduceren.



2

GESILICONISEERDE HOLLE VEZEL

De vezel is veerkrachtig, hol en licht. Voelt comfortabel aan en vervormt niet. Door de veerkrachtigheid is het zeer geschikt om goed druk op te vangen en biedt het goede ondersteuning.



3

EPS (PARELS)

Deze identieke EPS parels (1 millimeter groot) zorgen ervoor dat de cliënt optimaal wordt ondersteund. Door de combinatie van luchtfilters en parels wordt er drukreductie gecreëerd.



MINIMA-MAATJE

Is een klein en multifunctioneel component voor tegengesteld steunen in zijligging en onder Duorole en flexie te plaatsen om adductie te creëren.

Omschrijving: Mini-Maatje
Maten: breed 35 cm x hoog 30 cm
Artikelnummer: 77711
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



MAXIMA

Aangenaam om als hoog hoofdkussen te gebruiken en ideaal als voetensteun tegen spitsvoet vorming.

Omschrijving: Maxima
Maten: breed 67 cm x hoog 50 cm
Artikelnummer: 7777
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



SUPPORT

Support zorgt voor een 30 graden zijligging en wordt samen met Mini-Maatje toegepast.

Omschrijving: Support
Maten: breed 205 cm x hoog 35 cm
Artikelnummer: 7779
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



FORMA

Voor goede ondersteuning langs het hele lichaam. Het lichaam wordt niet gecorrigeerd, maar geaccepteerd. Ook geschikt bij buikligging.

Omschrijving: Forma
Maten: breed 200 cm x hoog 35 cm
Artikelnummer: 77716
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



TWISTER

Legt stuit, wervelkolom en hielen vrij. Handig in gebruik op de Intensive Care. Twister wordt met minimaal draaien onder de cliënt gebracht. Handig bij het corrigeren of opvangen van deformiteit zoals scoliose, kyfose of lordose. Bij buikligging wordt ook het scrotum vrij gelegd.

Omschrijving: Twister
Maten: breed 240 cm x hoog 16 cm
Artikelnummer: 77715
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



COMFORT EN COMFORT XL

Comfort legt schouders en ellebogen vrij. Comfort XL legt daarnaast ook de wervelkolom en stuit vrij. Beiden zijn tegengesteld te gebruiken om onderuitzakken tegen te gaan.


Omschrijving: Comfort en Comfort XL
Maten Comfort: breed 95 cm x hoog 33 cm
Maten Comfort XL: breed 115 cm x hoog 33 cm
Artikelnummer: 77710(L) en 77710(XL)
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



LUNA

Te gebruiken als hoofdkussen en is een handige hulp voor de 15 graden buikligging. Het legt dan het scrotum en de borst vrij.

Omschrijving: Luna
Maten: breed 70 cm x hoog 30 cm
Artikelnummer: 77717
Artikelnummer: 77723 (Doorademkussen)
BASIC UDI-DI: 87202564297775F

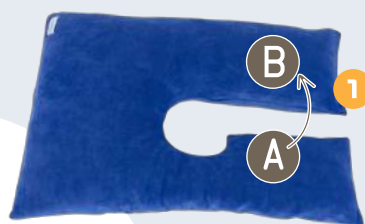

FREE EAR OORKUSSEN

Legt het oor vrij. Door A op B te plaatsen (eventueel vast zetten) ligt het achterhoofd vrij.

Omschrijving: Free Ear Oorkussen
Maten: breed 65 cm x hoog 50 cm
Artikelnummer: 7776
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



LUNA PEARL

(CVA) hemiplegie armlegger voor in bed of stoel. Ook een goede steun bij de enkels of flexie in rugligging als aanvulling op Duorole, Triorole of Flexie Abductie. Handig in gebruik onder de ellebogen bij zwaar leunen ten gevolge van bijvoorbeeld benauwdheid (COPD). Geschikt voor onderarm ondersteuning bij schouderfractuur of cuff ruptuur.

Omschrijving: Luna Pearl
Maten: breed 70 cm x hoog 30 cm
Artikelnummer: 77721
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



FREE EAR TUBE BUIKLIGGING KUSSEN

Is geschikt voor buikligging. Legt het oor vrij en voorkomt decubitus. Geeft ruimte voor de Tube. Plaatst het hoofd in de juiste houding.

Omschrijving: Free Ear Tube Buikligging kussen
Maten: breed 65 cm x hoog 50 cm
Artikelnummer: 7776 T
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



ROLE

Role is geschikt voor onder de knieholte (fowler) en langs de rug of buik geplaatst. Role helpt decubitus voorkomen onder de ellebogen bij (zwaar) ondersteunen ten gevolge van bijvoorbeeld benauwdheid (COPD). Role is tevens de vulling van Duorole, Triorole en flexiehoezen.

Omschrijving: Role

Maten: breed 95 cm x hoog 35 cm

Artikelnummer: 7778

BASIC UDI-DI: 8720256429775F



DUOROLE / TRIOROLE

Is geschikt voor het vrijleggen van de hielen. Ter voorkoming van wrijfdecubitus. Samen met de fowler haalt het druk weg van de stuit en zitbeenderen. Zorgt voor een betere spiertonus, helpt bij het doorbreken van spasmen en helpt contractuurvorming te voorkomen.

Omschrijving: Duorole / Triorole

Maten (2 of 3x): breed 95 cm x hoog 35 cm

Artikelnummer (2 of 3x): 7778

BASIC UDI-DI: 8720256429775F



CRESCENT

Te gebruiken als nekondersteuning. Ook geschikt als ondersteuning bij de enkels in rugligging als aanvulling op Duorole, Triorole of Flexie Abductie. In de buikligging geschikt om de patella vrij te leggen.

Omschrijving: Crescent

Maten: breed 50 cm x hoog 25 cm

Artikelnummer: 77718

BASIC UDI-DI: 8720256429775F



FLEXIE ABDUCTIE / FLEXIE XL

Voor preventief en curatief gebruik voor patiënten met decubitus aan stuit, zitbeenderen of tussen de knieën, alsook bij te hoge spierspanning. Het bovenste deel van Flexie Abductie of Flexie XL kan worden gevuld met Luna Pearl. Is geschikt voor patiënten met contracturen (dwangstand) Adductie kan men bereiden door Minima onder de zijanten te plaatsen (zie pijltje in afbeelding)

Omschrijving: Flexie Abductie / Flexie XL

Maten: breed 95 cm x hoog 40 cm

Artikelnummer: 2 of 3 x 7778 en 1 x 77721

BASIC UDI-DI: 8720256429775F



MULTI 54 EN MULTI 64

Voor ondersteuning van het been in een beenlade van een rolstoel of in bed. Ook handig om te gebruiken voor armondersteuning. Geschikt om in te zetten bij spierverslapping of verstijving en helpt elleboog decubitus voorkomen.

Omschrijving: Multi 54 en Multi 64

Maten Multi 54: breed 54 cm x hoog 35 cm

Artikelnummer: 77725

Maten Multi 64: breed 64 cm x hoog 35 cm

Artikelnummer: 77726

BASIC UDI-DI: 8720256429775F



DEKENBLOK

Dekenblok kan worden gebruikt ter vervanging van een dekenboog. Voor patiënten met een verhoogd risico op teen- en hieldecubitus door bijvoorbeeld dekendruk.

Omschrijving: Dekenblok

Artikelnummer : 7774

Maten: breed 67 cm x lengte 35 cm x dikte 12 cm

BASIC UDI-DI: 8720256429774V5



HANDY

Gebruik Handy als handschoen om gemakkelijk in het kussen een lichaamscontour (afdruk) te vormen. Handy is ook handig in gebruik bij het aan- of uittrekken van een kledingstuk of schoen. Tevens geschikt als tuber controle in een zit- of lighouding.

Omschrijving: Handy

Artikelnummer: 77722

Maten: breed 45 cm x hoog 20 cm



REBACARE® GEEFT 2 JAAR
PRODUCTGARANTIE OP DE DPO
REBACARE® GEEFT 6 MAANDEN
PRODUCTGARANTIE OP DE
VERBANDSCHOEN