

RUGLIGGING - FLEXIE ABDUCTIE INSTRUCTIE



- Indien Duorole niet voldoende ondersteuning biedt en er sprake is van niet genezende decubitus tussen de knieën, stuit of zitbeenderen.
- Beenspasmen en contracturen.

- CVA (beroerte), gewrichtsaandoeningen, MS (Multiple sclerose) en dwarslaesie.
- Rugklachten, spierdystrofie en bekkeninstabiliteit.

Plaats onder de benen tegen de billen. Gebruik eventueel de passieve tillift hiervoor. Let op dat het bovenste deel (hoes) leeg is.



Trek de lege hoes tussen de knieën door en plaats de vulling Luna Pearl voor model Flexie Abductie (M) en model Flexie XL. Voor model Flexie Abductie (S) kan Crescent worden gebruikt.



Strijk met de hand de parels tussen de knieën.



FLEXIE ABDUCTIE

Is verkrijgbaar in Small, Medium of XL

FLEXIE ABDUCTIE (S)



FLEXIE ABDUCTIE (M)



FLEXIE ABDUCTIE (XL)



Indien adductie is gewenst dan kunt u Minima plaatsen aan de gewenste zijde.

Indien de hielen nog het matras raken, dan aanvullen met Luna Pearl of Crescent.