

15A



Maak voor het aanbrengen een 'dakje' vorm van Duo 64 / Duorole / Flexie-Abductie.

STAP 1

Breng de benen omhoog (handzettingen) en plaats Comfort met de holle ronding tegen de billen.

STAP 2

Plaats je hand vanaf de billen onder de patiënt en til of rol patiënt een beetje opzij en plaats Comfort 10 cm onder het lichaam (herhalen tot Comfort is geplaatst)

STAP 3

Breng de benen omhoog (handzettingen) en leg Duo 64 / Duorole / Flexie **zonder abductie deel** boven op Comfort.

STAP 4



Niet meer dan een handbreedte ruimte tussen de billen en Duo 64 / Duorole / Flexie-Abductie.

STAP 5

Strijk onder de benen en pas het product aan (een mal maken) om correctie aan te brengen. Breng waar nodig meer of minder vulling aan de binnen- of buitenzijde van de benen en breng **abductie vulling deel** aan indien er sprake is van abductie.

STAP 6

Afsteunen voeten

