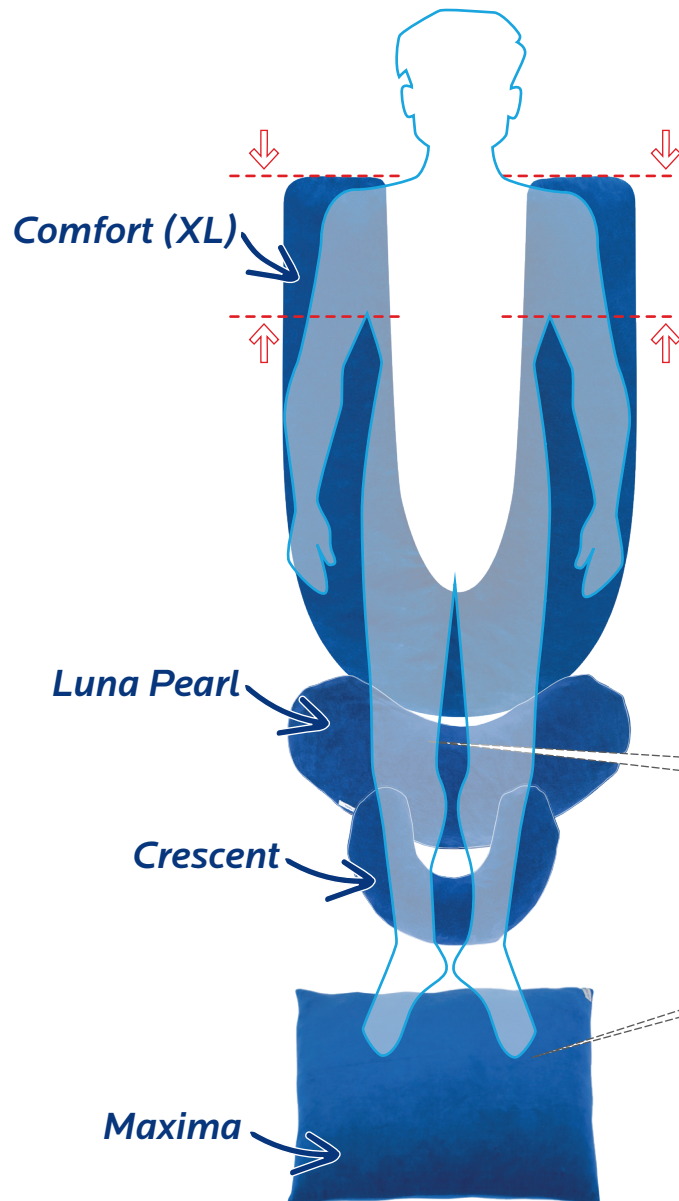


**STAP 1**

Breng de benen omhoog (handzettingen) en plaats Comfort met de holle ronding tegen de billen.

**STAP 2**

Plaats je hand vanaf de billen onder de patiënt en til of rol patiënt een beetje opzij en plaats Comfort 10 cm onder het lichaam (herhalen tot Comfort is geplaatst)

**STAP 3**

Comfort kan net boven de schouders of tot aan de oksels worden gepositioneerd.

**STAP 4**

Breng de benen omhoog (handzettingen) en leg Luna Pearl eventueel samen met Crescent aan.

**STAP 5**

Afsteunen voeten

Handzettingen  
met kantelen



Handzettingen  
zonder kantelen

