

Indien buikligging wordt toegepast houd rekening met de Wet zorg en dwang als patiënt niet uit zichzelf vanuit deze houding kan veranderen.

STAP 1

Free Ear Tube legt het oor vrij.

STAP 2


Trek een deel van Free Ear Tube onder de schouder, richting de borst.

STAP 3

Plaats je hand onder het bovenlichaam en til patiënt een beetje op (20 graden) en plaats Luna Pearl of bovendeel Twister.

STAP 4


Plaats je hand onder de knie en til patiënt een beetje op (20 graden) en plaats Multi 64 / Role of onderste deel van Twister.

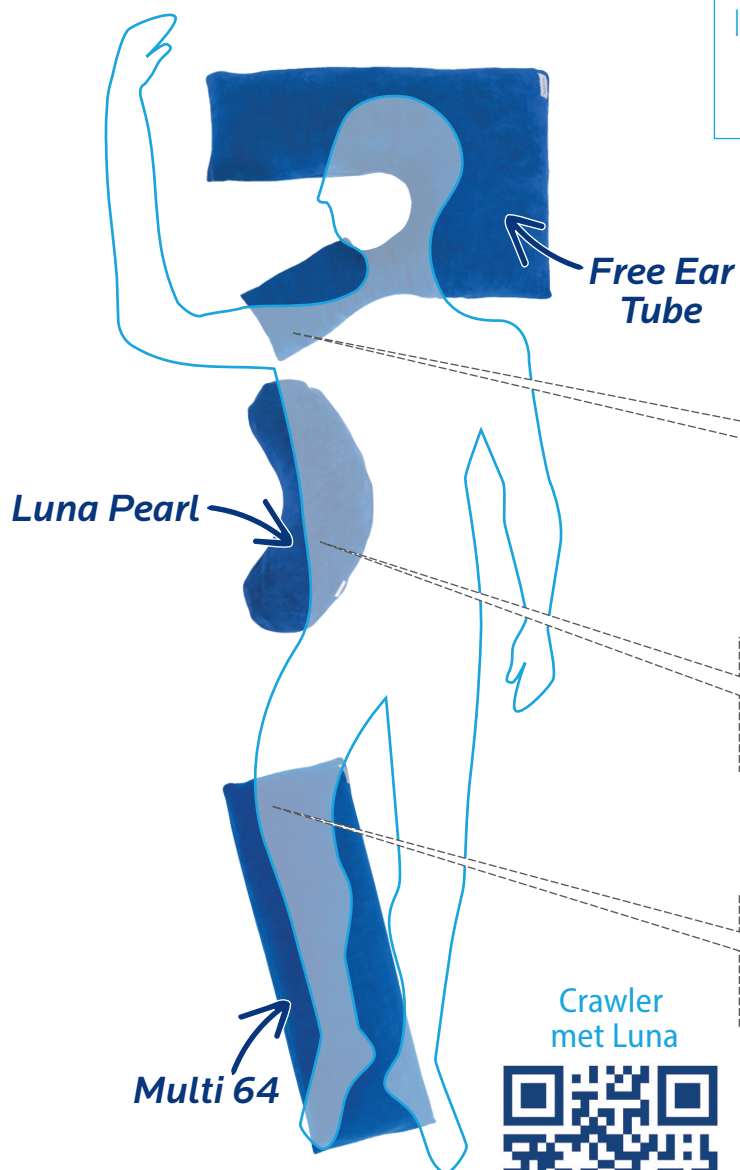

Multi 64



Crawler
met Luna

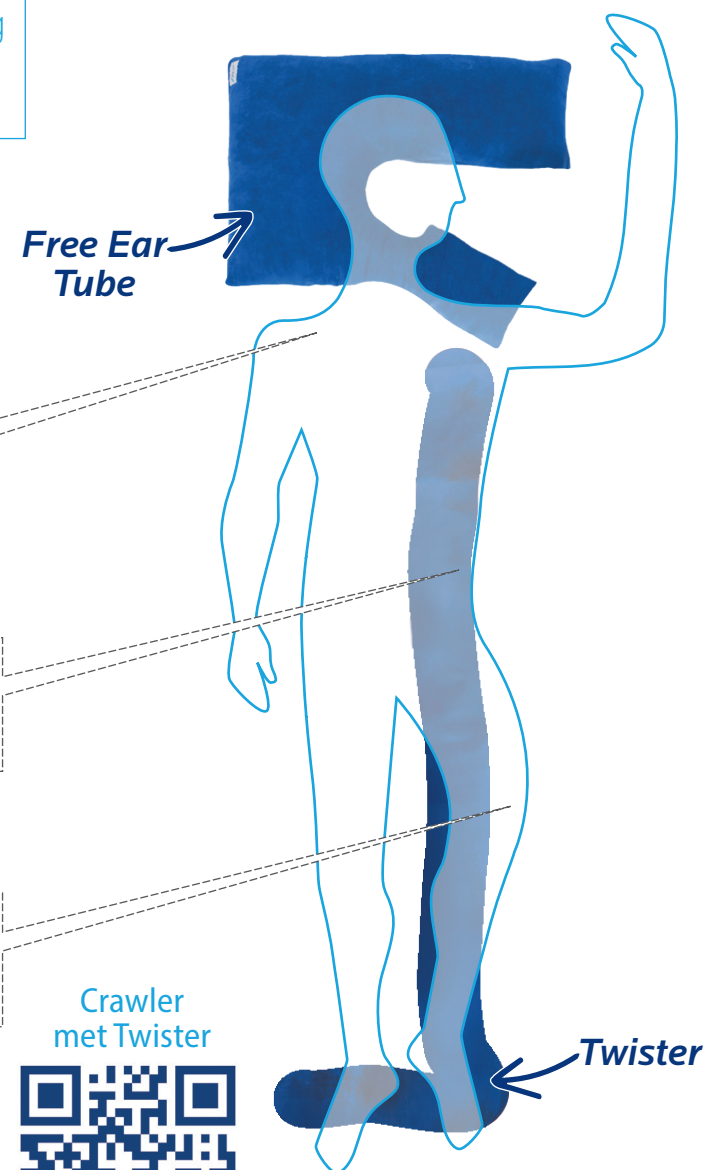

Crawler
met Twister



Twister