

Handzettingen
been verplaatsen**STAP 1**

Leg Comfort (XL) op bed en verdeel de vulling van Comfort met de meeste vulling in de ronding.

STAP 2

Leg Comfort (XL) met de ronding bij de voeten en duw ongeveer 10 centimeter Comfort tegen de lengte van de benen.

Comfort (XL)

Afsteuunen voeten

STAP 1

Leg Duo 64 / Duorole in de lengte onder het te corrigeren been.

Duo 64 / Duorole**Maxima**